



Produktkatalog Lymphologie



Mit neuer Farb- und Mustervielfalt und der mediven Flachstrick Versorgungslogik

Cosanum AG • Brandstrasse 28 • 8952 Schlieren • Schweiz
T +41 43 433 66 77 • ortho.order@cosanum.ch • www.cosanum.ch

medi. ich fühl mich besser.

Catalogue produits lymphologie

Produktkatalog Lymphologie

Catalogue de produits Lymphologie



Avec une nouvelle variété de coloris et de motifs et le principe de soin mediven du tricot plat



medi. I feel better.



6

Récapitulatifs mediven

Principe de soin
Propriétés des produits
Ordonnance pour bas de
compression

De la prescription au dispositif
optimal.



16

mediven® 550 jambe

Robuste. Rigide. Maintien
efficace.



22

mediven® cosy

Flexible. Souple. Liberté de
mouvement.



28

mediven mondi

Doux. Fin. Bel aspect.

34

Tableaux des modèles mediven pour les jambes

Coloris, motifs et accessoires



44

mediven 550 bras

Robuste. Rigide. Maintien
efficace.



48

mediven mondi esprit

Doux. Fin. Bel aspect.



52

mediven harmony

Manchon pour bras en tricot
circulaire
en sept tailles de série.

58

Tableaux des modèles mediven pour les bras

Coloris, motifs et accessoires



66

Accessoires medi

Produits de soin medi
Aides à l'enfilage et au retrait
medi
Butler medi
Aides au traitement

76

Services

Boutique en ligne medi
www.medi.de

Principe de soin Tricot plat mediven® pour la jambe

Étape 1 : l'indication

Conseil medi :

Pour les indications, nous nous référons à l'actuelle directive S2k Thérapie médicale par compression¹, à la directive S1 Lipœdème² et à la directive S2k Diagnostic et traitement des lymphœdèmes³. Pour le traitement avec des dispositifs de thérapie par compression, les directives applicables en vigueur doivent être prises en compte.⁴

Indication	mediven® 550 jambe	mediven® cosy	mediven mondi®
Lymphœdème primaire et secondaire	●	●	●
Lipœdème	●	●	●
Traitement de cicatrices	●	●	●
Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques	●	●	●
Formes mixtes : phlébo-lymphœdèmes, lipo-lymphœdèmes	●	●	
Insuffisance veineuse chronique sévère			●

Étape 2 : tenir compte du stade

Indication	Diagnostic	Caractéristiques	mediven® 550 jambe	mediven® cosy	mediven mondi®
 <p>Stade 3</p>	Stade 1	Surface de la peau lisse, épaissement homogène du tissu sous-cutané par endroits	●	●	●
	Stade 2	Surface de la peau boursoufflée, structures nodulaires dans le tissu sous-cutané épaissi	●	●	●
	Stade 3	Surface de la peau présentant de gros nodules, volume accru avec débordement de lobes tissulaires	●	●	
 <p>Stade 2</p>	Stade 1	Réversible spontanément, consistance molle, une élévation réduit le gonflement, capitons faciles à enfoncer	●	●	●
	Stade 2	Non réversible spontanément, œdème durci, l'élévation n'élimine pas le gonflement, capitons difficiles à enfoncer	●	●	●
	Stade 3	Gonflement difforme d'ampleur extrême, fort durcissement de la peau, apparition de cloques et de fistules	●		

¹ Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

² Reich-Schupke S et al. Directive S1 Lipœdème. Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-012.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

³ Oberlin M et al. Directive S2k : diagnostic et traitement des lymphœdèmes. Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/058-001.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

⁴ Répertoire des dispositifs et produits auxiliaires de l'organisation faîtière des caisses d'assurance maladie GKV-Spitzenverband, catégorie PG 17. Publication en ligne sur : <https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home/verzeichnis/7c51a666-bee0-452b-94a9-e367216d5b2e> (dernière consultation le 08/03/2021)

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons les produits mediven tricotés à plat aux patients présentant les caractéristiques suivantes.*

Étape 3 : tenir compte des critères individuel du patient

Matériau**	Léger p. ex. mediven mondi®	Moyen p. ex. mediven® cosy	Robuste p. ex. mediven® 550 jambe
Critères			
Tissu conjonctif	normal à ferme	mou à ferme	très mou à durci
Poids			
Plis de peau profonds / variations de calibre	néant	faibles	accentués
Degré de sévérité de la maladie			
Bas de compression mediven recommandé :			
			

Recommandation :

**Rigidité

- Plus le tissu conjonctif est **mou**,
- Plus le poids est **élevé**,
- Plus les plis de la peau/les variations de calibre sont **accentués**,
- Plus la maladie est **grave**,

→ plus **rigide** doit être le matériau du bas.

→ Pour le choix du matériau, le critère le plus marqué est déterminant.

* Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical. Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

Principe de soin Tricot plat mediven® pour le bras

Étape 1 : l'indication

Conseil medi :

Pour les indications, nous nous référons à l'actuelle directive S2k Thérapie médicale par compression¹, à la directive S1 Lipœdème² et à la directive S2k Diagnostic et traitement des lymphœdèmes³. Pour le traitement avec des dispositifs de thérapie par compression, les directives applicables en vigueur doivent être prises en compte.⁴

Indication	mediven® 550 bras	mediven® mondi esprit
Lymphœdème primaire et secondaire	●	●
Lipœdème	●	●
Traitement de cicatrices	●	●
Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques	●	●

Étape 2 : tenir compte du stade

Indication	Diagnostic	Caractéristiques	mediven® 550 bras	mediven® mondi esprit
	Stade 1	Surface de la peau lisse, épaissement homogène du tissu sous-cutané par endroits	●	●
	Stade 2	Surface de la peau boursouflée, structures nodulaires dans le tissu sous-cutané épaissi	●	●
	Stade 3	Surface de la peau présentant de gros nodules, volume accru avec débordement de lobes tissulaires	●	
	Stade 1	Réversible spontanément, consistance molle, une élévation réduit le gonflement, capitons faciles à enfoncer	●	●
	Stade 2	Non réversible spontanément, œdème durci, l'élévation n'élimine pas le gonflement, capitons difficiles à enfoncer	●	●
	Stade 3	Gonflement difforme d'ampleur extrême, fort durcissement de la peau, apparition de cloques et de fistules	●	

¹ Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

² Reich-Schupke S et al. Directive S1 Lipœdème. Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-012.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

³ Oberlin M et al. Directive S2k : diagnostic et traitement des lymphœdèmes. Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/058-001.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons les produits mediven tricotés à plat aux patients présentant les caractéristiques suivantes.*

Étape 3 : tenir compte des critères individuel du patient

Matériau**	Léger / Moyen p. ex. mediven® mondi esprit	Robuste p. ex. mediven® 550 bras
Critères		
Tissu conjonctif	normal à ferme	très mou à durci
Poids		
Plis de peau profonds / réductions de calibre	néant / faibles	faibles / accentués
Degré de sévérité de la maladie		
Bas de compression mediven recommandé :	mediven® mondi esprit	mediven® 550 bras

Recommandation :

**Rigidité

- Plus le tissu conjonctif est **mou**,
- Plus le poids est **élevé**,
- Plus les plis de la peau/les variations de calibre sont **accentués**,
- Plus la maladie est **grave**,

→ plus **rigide** doit être le matériau du bas.

→ Pour le choix du matériau, le critère le plus marqué est déterminant.

* Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical. Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels de la patiente ou du patient.

Caractéristiques des produits mediven®



Clima Comfort

Clima Comfort* pour

- Évacuation rapide de l'humidité depuis la surface de la peau
- Bonne micro-respiration



Clima Fresh

Fonction Clima-Fresh intégrée

- Effet antibactérien
- Pas de prolifération des bactéries à l'origine de mauvaises odeurs



Perfect Fit

Perfect Fit

- Excellent ajustement
- Efficacité médicale du dosage de la pression
- Conditions de soins optimales en série ou sur mesure



Variété

Grand choix de variantes et d'exécutions spéciales

De la couleur pour une meilleure qualité de vie

- Tous les coloris standard sont disponibles immédiatement
- Coloris tendance livrables en 10 jours ouvrés

Facile d'entretien

- Passe au lave-linge et au sèche-linge, programme tissus sensibles



Les bas de compression mediven ne contiennent pas de latex.



* Clima Comfort

Testé scientifiquement par l'institut français IFTH. Les résultats du test montrent que la technologie Clima Comfort de medi permet d'équilibrer le climat entre la peau et le bas. medi obtient l'excellente note globale de 11 sur 12.

mediven® 550 jambe

Robuste. Rigide. Maintien efficace.

Conseil médi¹ :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven 550 jambe dans les cas suivants :

- Tissu conjonctif très mou à durci
- Plis de peau / variations de calibre prononcés
- Obésité concomitante
- Lymphœdèmes prononcés

Indications²

- Lymphœdèmes primaires et secondaires des stades 1, 2 et 3
- Lipœdèmes des stades 1, 2 et 3
- Traitement de cicatrices
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Formes mixtes : phlébo-lymphœdèmes, lipo-lymphœdèmes

Propriétés

- Rigidité très élevée
- Pression de travail élevée
- Tricot épais et robuste
- Résistance élevée

Particularités

- Grand choix d'accessoires (zone de soulagement de l'hallux, zones fonctionnelles, galbant fessier)
- Nombreux modèles, p. ex. segments de jambe pour les soins doubles ou multiples
- Facteur de protection UV 40
- Effet anti-odeur avec Clima Fresh
- Tricot respirant grâce à Clima Comfort




- Choix tendance : 6 coloris standard, 5 coloris tendance et 4 motifs à combiner pour éléments design et éléments fashion
- Possibilité de décoration avec des cristaux scintillants

Consignes de lavage

Facile à entretenir     

Passes au lave-linge et au sèche-linge

Modèles livrables

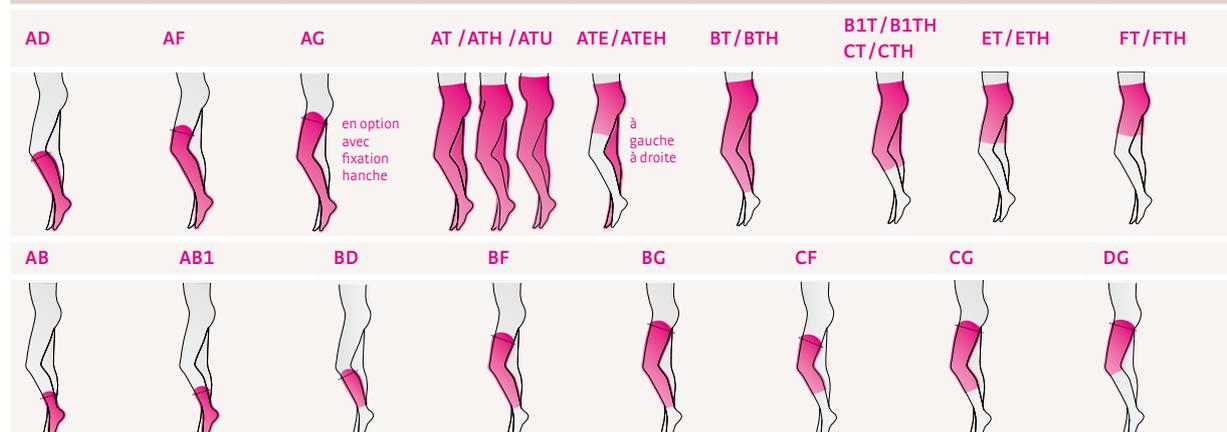

Avantages du produit



Modèles standard

Fabrication sur mesure	Uniquement
Extrémité proximale	Légèrement en biais sur tous les modèles de bas
Exécutions	Légèrement en biais au niveau des cuisses et ceinture perforée pour tous les modèles de collants
Entrejambe/partie ventrale	Version standard pour femme : AT avec mit partie ventrale 3D (compressive) Entrejambe homme : ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH Partie ventrale non compressive devant : ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Pied	Pied ouvert, incliné

Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	23 %	77 %
CCL 2	25 %	75 %
CCL 3	28 %	72 %
CCL 4	32 %	68 %

Conseil medi :



les butlers medi facilitent l'enfilage⁴

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 70 et suivantes

Classe de compression


CCL 1, 2, 3, 4

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard

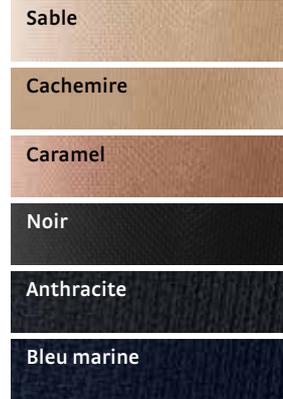


Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Motifs³

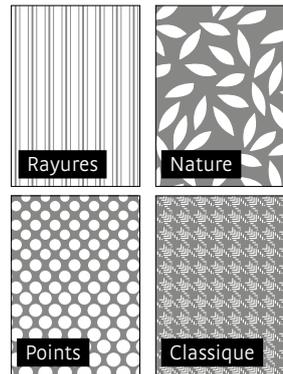

Disponible avec cristaux scintillants.



- ¹ Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.
- ² Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.
- ³ Les éléments design et les éléments mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance. Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.
- ⁴ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 02/03/2020)

Coiffe-orteils mediven® 550

Robuste. Rigide. Maintien efficace.

Indications¹

- Patients souffrant de lymphœdème dans les orteils (signe de Stemmer positif) et sur le cou-de-pied

Propriétés

- Coiffe-orteils avec Clima Fresh : empêche les mauvaises odeurs et l'installation de bactéries
- Principe fond et couvercle :
 - coutures décalées sur le dessus et le dessous des orteils (pas de coutures entre les orteils)
 - réalisation sur mesure de chaque orteil
- Conseil medi : intégration de patchs lymphatiques medi en option pour augmenter la pression en cas de lymphœdème du cou-de-pied



Coiffe-orteils tricoté en continu

- Plus de sécurité lors des mesures (plus besoin de calculer la zone de superposition)
- Soins adaptés aux indications pour une circulation lymphatique optimale (pas de coutures circulaires)
- Agréable à porter, pas de coutures circulaires
- Excellent maintien, ne glisse pas
- Disponible pour les modèles AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Possibilité de catégories de compression différentes au niveau des jambes et des orteils



Coiffe-orteils individuel

- Rigidité augmentée grâce à la double couche de bas pour les œdèmes prononcés sur le cou-de-pied
- Possibilités de soins personnalisés, p. ex. soins de nuit ou combinaison avec d'autres produits
- Coutures décalées au milieu du dessous du pied (couture latérale possible sur demande spéciale)

Conseil medi :

Le coiffe-orteils individuel permet un enfilage et un retrait facile et rapide.

Avantages du produit



Classe de compression

CCL 1, 2, 3

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard




Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Motifs^{2,3}

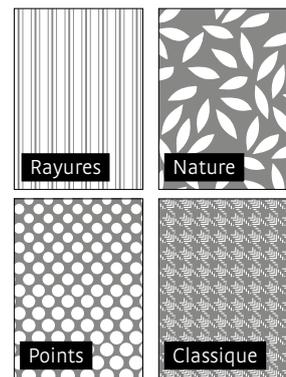

Modèles livrables



Remarque

Le saviez-vous ?

- 82 % des patients atteints de lymphœdème présentent un signe de Stemmer positif*
 - 63 % des patients atteints de lymphœdème présentent un gonflement du cou-de-pied*
- Pour le traitement optimal de ces patients, l'utilisation d'un coiffe-orteils est recommandée.

* Source : Dr. Schingale « Lymphœdème Lipœdème – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene » (Lymphœdèmes et lipœdèmes – Diagnostic et thérapie – Un guide pratique pour les patients)

¹ Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.
² Les éléments design et mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance.
³ Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.

mediven[®] cosy

Flexible. Souple. Liberté de mouvement.

Conseil medi¹ :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven cosy dans les cas suivants :

- Tissu conjonctif mou à ferme
- Plis de peau / variations de calibre modérés
- Obésité concomitante
- Patients atteints de lipœdème
- Voyages et sport

Indications²

- Lymphœdèmes primaires et secondaires des stades 1 et 2
- Lipœdèmes des stades 1, 2 et 3
- Traitement de cicatrices
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Formes mixtes : phlébo-lymphœdèmes, lipo-lymphœdèmes

Propriétés

- Rigidité moyenne
- Allongement longitudinal élevé
- Tricot souple et doux
- Résistance élevée

Particularités

- Enfilage aisé grâce au tricot souple élastique en longueur
- Forme du pied anatomique spéciale
- Tricot résistant au niveau de la plante du pied et du talon pour une grande longévité
- Grand choix d'accessoires (zone de soulagement de l'hallux, zones fonctionnelles, galbant fessier)




- Nombreux modèles, p. ex. segments de jambe pour les soins doubles ou multiples
- Facteur de protection UV 80
- Effet anti-odeur avec Clima Fresh
- Tricot respirant grâce à Clima Comfort
- Choix tendance : 6 coloris standard, 5 coloris tendance et 4 motifs à combiner pour éléments design et éléments mode
- Possibilité de décoration avec des cristaux scintillants

Consignes de lavage

Facile à entretenir 

Passer au lave-linge et au sèche-linge

Modèles livrables

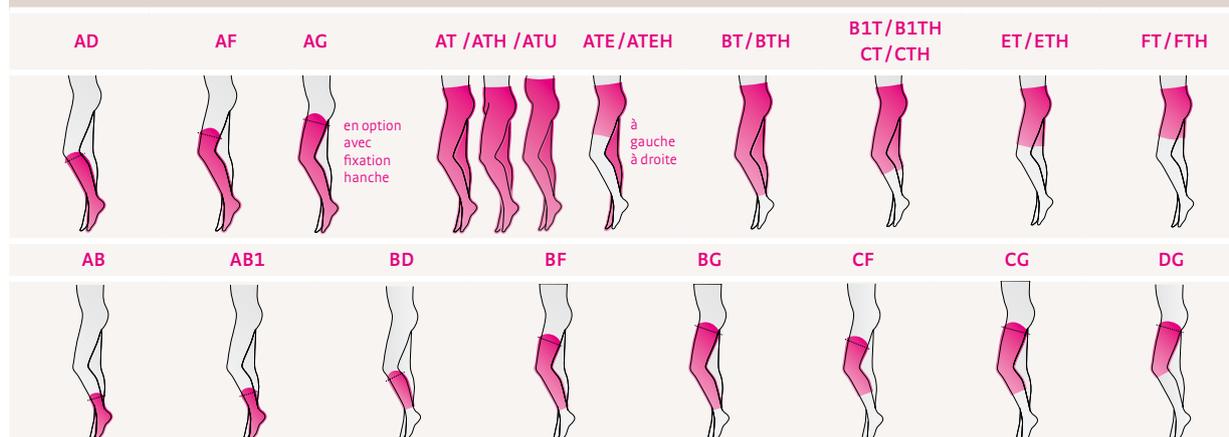

Avantages du produit



Modèles standard

Fabrication sur mesure	Uniquement
Extrémité proximale	Légèrement en biais sur tous les modèles de bas
Exécutions	Légèrement en biais au niveau des cuisses et ceinture perforée pour tous les modèles de collants
Entrejambe/partie ventrale	Version standard pour femme : AT avec mit partie ventrale 3D (compressive) Entrejambe homme : ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH Partie ventrale non compressive devant : ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Pied	Pied ouvert, incliné

Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	15 %	85 %
CCL 2	20 %	80 %
CCL 3	28 %	72 %

Classe de compression

CCL 1, 2, 3

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard




Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés




Motifs³

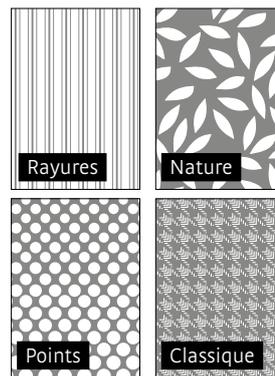

Disponible avec cristaux scintillants.



Conseil medi :

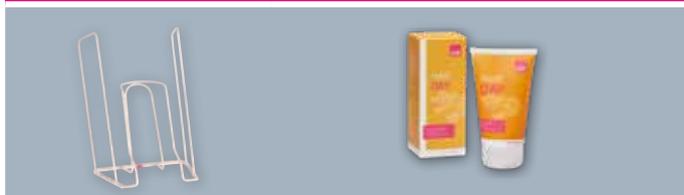

les butlers medi facilitent l'enfilage⁴

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 70 et suivantes

- ¹ Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.
- ² Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.
- ³ Les éléments design et les éléments mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance. Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.
- ⁴ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

Coiffe-orteils mediven® cosy

Flexible. Souple. Liberté de mouvement.

Indications¹

- Patients souffrant de lymphœdème dans les orteils (signe de Stemmer positif) et sur le cou-de-pied

Propriétés

- Coiffe-orteils avec Clima Fresh : empêche les mauvaises odeurs et l'installation de bactéries
- Principe fond et couvercle :
 - coutures décalées sur le dessus et le dessous des orteils (pas de coutures entre les orteils)
 - réalisation sur mesure de chaque orteil
- Conseil medi : intégration de patches lymphatiques medi en option pour augmenter la pression en cas de lymphœdème du cou-de-pied



Coiffe-orteils tricoté en continu

- Plus de sécurité lors des mesures (plus besoin de calculer la zone de superposition)
- Soins adaptés aux indications pour une circulation lymphatique optimale (pas de coutures circulaires)
- Agréable à porter, pas de coutures circulaires
- Excellent maintien, ne glisse pas
- Disponible pour les modèles AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Possibilité de catégories de compression différentes au niveau des jambes et des orteils



Coiffe-orteils individuel

- Rigidité augmentée grâce à la double couche de bas pour les œdèmes prononcés sur le cou-de-pied
- Possibilités de soins personnalisés, p. ex. soins de nuit ou combinaison avec d'autres produits
- Coutures décalées au milieu du dessous du pied (couture latérale possible sur demande spéciale)

Conseil medi :

Le coiffe-orteils individuel permet un enfilage et un retrait facile et rapide.

Avantages du produit



Modèles livrables



Remarque

Le saviez-vous ?

- 82 % des patients atteints de lymphœdème présentent un signe de Stemmer positif*
 - 63 % des patients atteints de lymphœdème présentent un gonflement du cou-de-pied*
- Pour le traitement optimal de ces patients, l'utilisation d'un coiffe-orteils est recommandée.

* Source : Dr. Schingale « Lymphœdème Lipœdème – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene » (*Lymphœdèmes et lipœdèmes – Diagnostic et thérapie – Un guide pratique pour les patients*)

Classe de compression

CCL 1, 2

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard




Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Motifs^{2,3}

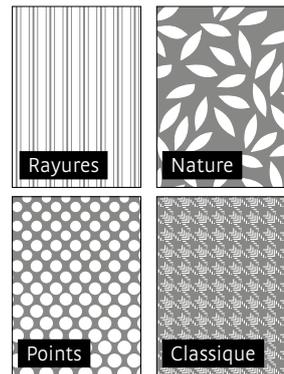

- ¹ Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.
- ² Les éléments design et mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance.
- ³ Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.

mediven mondi®

Doux. Fin. Bel aspect.

Conseil medi¹ :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven mondi dans les cas suivants :

- Tissu conjonctif normal à ferme
- Pas de plis de peau / de variations de calibre
- Poids normal (forme de jambe normale)
- Dermatite atopique (mediven mondi avec segments en argent)

Indications²

- Lymphœdèmes primaires et secondaires des stades 1 et 2
- Lipœdèmes des stades 1 et 2
- Traitement de cicatrices
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Insuffisance veineuse chronique sévère (p. ex. prévention de la récurrence de l'ulcère veineux de la jambe)

Propriétés

- Rigidité modérée
- Allongement transversal élevé
- Tricot fin et souple
- Résistance élevée

Particularités

- Disponible avec des segments en argent : Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G
 - Effet antibactérien, p. ex. chez les patients qui présentent une dermatite atopique
 - Les segments permettent une utilisation ciblée et au juste prix
- Nombreuses possibilités de combinaison avec des accessoires spéciaux comme les inserts en Y
- Facteur de protection UV 80



- Effet anti-odeur avec Clima Fresh
- Tricot respirant grâce à Clima Comfort
- Choix tendance : 6 coloris standard et 5 coloris tendance
- Possibilité de décoration avec des cristaux scintillants

Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passe au lave-linge et au sèche-linge

Conseil medi :



les butlers medi facilitent l'enfilage³

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 70 et suivantes

¹ Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

² Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

³ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k: la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 02/03/2020)

Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Variété



Perfect Fit



Anatomic Fit



Modèles standard

Fabrication sur mesure	Uniquement
Extrémité proximale	Légèrement en biais sur tous les modèles de bas
Exécution	Légèrement en biais au niveau des cuisses et ceinture perforée pour tous les modèles de collants
Entrejambe/partie ventrale	Version standard pour femme : AT avec mit partie ventrale 3D (compressive) Entrejambe homme : ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH Partie ventrale non compressive devant : ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Pied	Pied ouvert, incliné
Segments en argent livrables	Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G


Composition de mediven mondi

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL1	22 %	78 %
CCL2	24 %	76 %
CCL3	28 %	72 %

Composition de mediven mondi avec fil d'argent

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)	Fil d'argent
CCL1	22 %	77 %	1 %
CCL2	24 %	75 %	1 %
CCL3	28 %	71 %	1 %

Modèles livrables

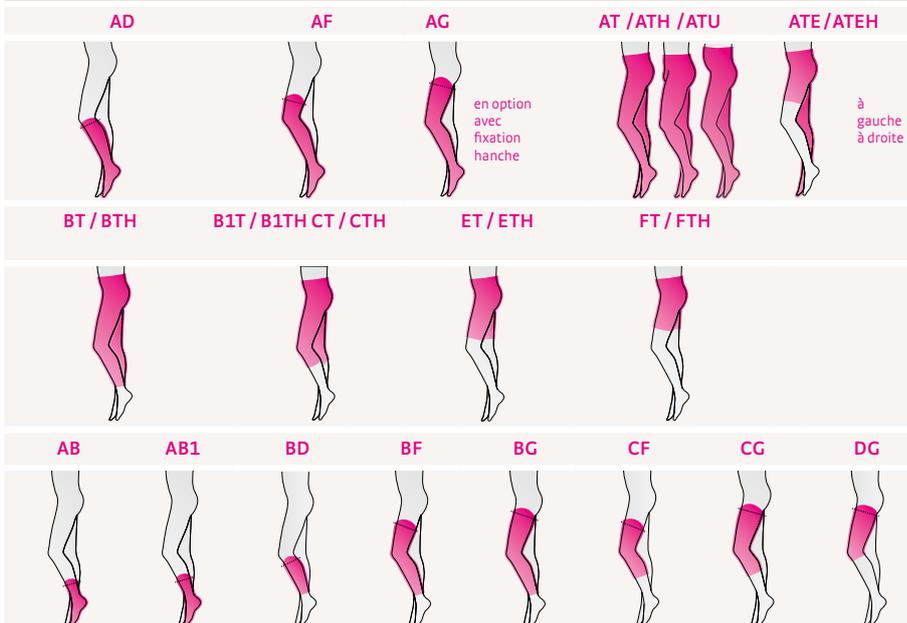

Classe de compression

CCL 1, 2, 3

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard



Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Disponible avec cristaux scintillants.



Coiffe-orteils mediven mondi®

Doux. Fin. Bel aspect.

Indications¹

- Patients souffrant de lymphœdème dans les orteils (signe de Stemmer positif) et sur le cou-de-pied

Propriétés

- Coiffe-orteils avec Clima Fresh : empêche les mauvaises odeurs et l'installation de bactéries
- Principe fond et couvercle :
 - coutures décalées sur le dessus et le dessous des orteils (pas de coutures entre les orteils)
 - réalisation sur mesure de chaque orteil



Coiffe-orteils tricoté en continu

- Plus de sécurité lors des mesures (plus besoin de calculer la zone de superposition)
- Soins adaptés aux indications pour une circulation lymphatique optimale (pas de coutures circulaires)
- Agréable à porter, pas de coutures circulaires
- Excellent maintien, ne glisse pas
- Disponible pour les modèles AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Possibilité de catégories de compression différentes au niveau des jambes et des orteils



Coiffe-orteils individuel

- Rigidité augmentée grâce à la double couche de bas pour les œdèmes prononcés sur le cou-de-pied
- Possibilités de soins personnalisés, p. ex. soins de nuit ou combinaison avec d'autres produits
- Coutures décalées au milieu du dessous du pied (couture latérale possible sur demande spéciale)

Conseil medi :

Le coiffe-orteils individuel permet un enfilage et un retrait facile et rapide.

Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Variété



Perfect Fit



Anatomic Fit



Classe de compression

CCL 1, 2

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard

Sable

Cachemire

Caramel

Noir

Anthracite

Bleu marine

Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés

medi Magenta

Gris

Châtain

Jaune mangue

Framboise

Modèles livrables

Coiffe-orteils fermé



Coiffe-orteils fermé, sans petit orteil



Coiffe-orteils ouverts



Coiffe-orteils ouvert, sans petit orteil



Remarque

Le saviez-vous ?

- 82 % des patients atteints de lymphœdème présentent un signe de Stemmer positif*
 - 63 % des patients atteints de lymphœdème présentent un gonflement du cou-de-pied.*
- Pour le traitement optimal de ces patients, l'utilisation d'un coiffe-orteils est recommandée.

* Source : Dr. Schingale « Lymphœdème Lipœdème – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene » (*Lymphœdèmes et lipœdèmes – Diagnostic et thérapie – Un guide pratique pour les patients*)

¹ Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

Modèles pour jambe mediven® en tricot plat


Palette de coloris

Coloris		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Coloris standard				
Sable		•	•	•
Cachemire		•	•	•
Caramel		•	•	•
Noir		•	•	•
Anthracite		•	•	•
Bleu marine		•	•	•
Coloris tendance (délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés)				
medi Magenta		•	•	•
Gris		•	•	•
Châtain		•	•	•
Jaune mangue		•	•	•
Framboise		•	•	•

Vous trouverez aussi tous les coloris standard et tendance pour nos modèles tricotés à plat sur le medi e-shop.

Modèles pour jambe mediven® en tricot plat

Motifs

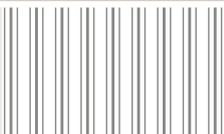Motif		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Rayures			•	•
Nature			•	•
Points			•	•
Classique			•	•

Tout simplement medi : les éléments design et fashion sont disponibles pour tous les coloris standard et tendance



Élément fashion



Élément design

Cristaux scintillants		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Motifs³ (placés sur le côté extérieur de la cheville)				
Vent en or		•	•	•
Fierté à Athracite		•	•	•
Trio en argent		•	•	•

¹ Les éléments design et mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance.


² Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.


³ Les trois motifs en cristaux peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance. Le supplément de prix pour les cristaux scintillants est indiqué dans la liste des prix en vigueur.

Modèles pour jambe mediven® en tricot plat

Accessoires

Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Bandes anti-glisse				
Bandes anti-glisse 5 cm				
Bande anti-glisse à picots		•	•	•
Bande anti-glisse à picots avec motif		•	•	•
Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles		•	•	•
Bande anti-glisse large avec motif de rose		•	•	•
Bandes anti-glisse 2,5 cm				
Bande anti-glisse à picots		•	•	•
Sections de bande anti-glisse				
Segments anti-glisse à picots, micro-picots ou larges <ul style="list-style-type: none"> • le long du biais • en longueur par-dessus E • en longueur derrière par-dessus la couture • en longueur oblique sur AD • sur la couture du haut, sur le côté • dans la partie slip • sur le bas horizontalement par-dessus A1 • sur la plante des pieds 		•	•	•
Segments avec picots en silicone <ul style="list-style-type: none"> • le long du biais (1 segment) • le long du biais (2 segments côte à côte) • en longueur par-dessus E • en longueur derrière par-dessus la couture • sur la plante des pieds • dans la partie slip à l'avant (segment à gauche + à droite) • dans la partie slip à l'arrière (segment à gauche + à droite) 		•	•	•
Bande anti-glisse sur l'extrémité distale de la jambe				
Bande anti-glisse (mince) au bout de la jambe pour les collants sans pied		•	•	•
Autres fixations				
Fixations hanches		•	•	•
Bretelles		•	•	•

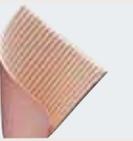Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Fermetures				
Fermeture éclair		•	•	•
Fermeture velcro		•	•	•
Bande à œillets et crochets		•	•	•
Coussinets et doublure				
Patch lymphatique avec poche intégrée		•	•	•
• Patch lymphatique côtelé		•	•	•
• Patch lymphatique à petits picots		•	•	•
• Patch lymphatique à gros picots		•	•	•
Coussinets en silicone		•	•	•
Poche pour patch lymphatique ou coussinet		•	•	•
Doublure		•	•	•
Coussinets avec revêtement en tissu		•	•	•

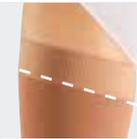Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Extrémités				
Extrémité jambe (proximale)				
Légèrement en biais (standard)		•	•	•
Fortement en biais		•	•	•
Droite		•	•	•
Rehaussement du haut de cuisse				
Prolongation de l'avant des cuisses		•	•	•
Zone fonctionnelle genou				
Tricot spécial pour la rotule et le creux du genou			•	•
Ellipse E				
Prolongation elliptique de l'avant du genou		•	•	•
Marquage du tricot				
Maille relevée au niveau du point de mesure D		•	•	•
Jambe, autre CCL				
CCL différente pour les deux parties de la jambe		•	•	•
Rangées poreuses				
Fil de trame de compression seulement une rangée sur deux		•	•	•

Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Partie slip				
Modèles de partie slip				
Partie slip AT (partie slip 3D) Version standard pour femme		•	•	•
Partie slip AT/U Modèle de grossesse		•	•	•
Partie slip AT/H Partie slip avec entrejambe homme intégré		•	•	•
Galbant fessier			•	•
Extrémité de la partie slip				
Bande perforée (standard)		•	•	•
Bande à la taille		•	•	•
Bande à la taille réglable		•	•	•
Bordure tricotée		•	•	•
Bandes anti-glisse (à picots)		•	•	•

Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Suspensoir – entrejambe homme sur mesure				
Tricot (standard)		•	•	•
Matière filet		•	•	•
Tricot compressif		•	•	•
Gousset à l'entrejambe – gousset cintré avec bande surélevée à l'avant et à l'arrière				
Tricot (standard)		•	•	•
Matière filet		•	•	•
Tricot compressif		•	•	•
Partie slip, autre CCL				
Partie slip, CCL plus basse		•	•	•
Fente transversale				
Empiècement superposé transversalement pour les parties slip pour homme		•	•	•
Entrejambe ouvert				
Collant sans gousset cousu		•	•	•
Ouverture pour stomie				
Orifice personnalisé dans la partie slip		•	•	•
Pied				
Bout du pied				
Bout du pied ouvert (standard)		•	•	•
Pointe de pied fermée		•	•	•
Extrémité du pied (distale)				
Extrémité du pied distale oblique (standard)		•	•	•
Extrémité du pied distale droite		•	•	•
Zone de soulagement de l'hallux				
Tricot flexible au niveau de l'hallux valgus			•	•
Zone de soulagement du quintus varus				
Tricot flexible au niveau du quintus varus			•	•
Pied équin				
Pied en flexion plantaire		•	•	•

Accessoire		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 jambe
Bout souple				
Tissu tricoté particulièrement souple et élastique pour le bout du pied				•
Prolongation de la plante du pied				
Prolongation du tissu tricoté compressif sous le pied		•	•	•
Inserts en Y				
Positionnement du pied à 90° grâce à des inserts supplémentaires dans la zone de tension		•	•	•
Bout du pied cousu en rond				
Bout tricoté cousu en rond		•	•	•
Couture latérale				
Coutures latérales sur coiffe-orteils amovible		•	•	•
Gros orteil séparé				
Emplacement séparé pour le gros orteil		•		•
Bride au niveau du talon				
Bride au niveau du talon pour les leggings		•	•	•
Segments en argent				
Inserts en argent Y-C, Y-D, Y-G A-C, A-D, A-G		•		
Modèles pour moignon				
Extrémité du bas plate (en cercle)		•	•	•
Extrémité du bas anatomique (extrémité du moignon)		•	•	•
Variantes de coutures				
Bande sur la couture		•	•	•
Remaillage		•	•	•
Étiquette à l'extérieur		•	•	•

mediven[®] 550 bras

Robuste. Rigide. Maintien efficace.

Conseil medi¹:

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven 550 bras dans les cas suivants :

- Tissu conjonctif très mou à durci
- Plis de peau / variations de calibre modérés à prononcés
- Obésité concomitante
- Lymphœdèmes prononcés

Indications²

- Lymphœdèmes primaires et secondaires des stades 1, 2 et 3
- Lipœdèmes des stades 1, 2 et 3
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Traitement de cicatrices

Propriétés

- Rigidité élevée
- Pression de travail élevée
- Tricot épais et robuste
- Résistance élevée


Particularités

- De nombreuses possibilités de combinaison avec des accessoires particuliers
- Nombreux modèles, p. ex. manchettes pour les soins doubles ou multiples
- Facteur de protection UV 20
- Effet anti-odeur avec Clima Fresh
- Tricot respirant grâce à Clima Comfort
- Choix tendance : 6 coloris standard, 5 coloris tendance et 4 motifs à combiner pour éléments design et éléments mode
- Possibilité de décoration avec des cristaux scintillants

Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passer au lave-linge et au sèche-linge

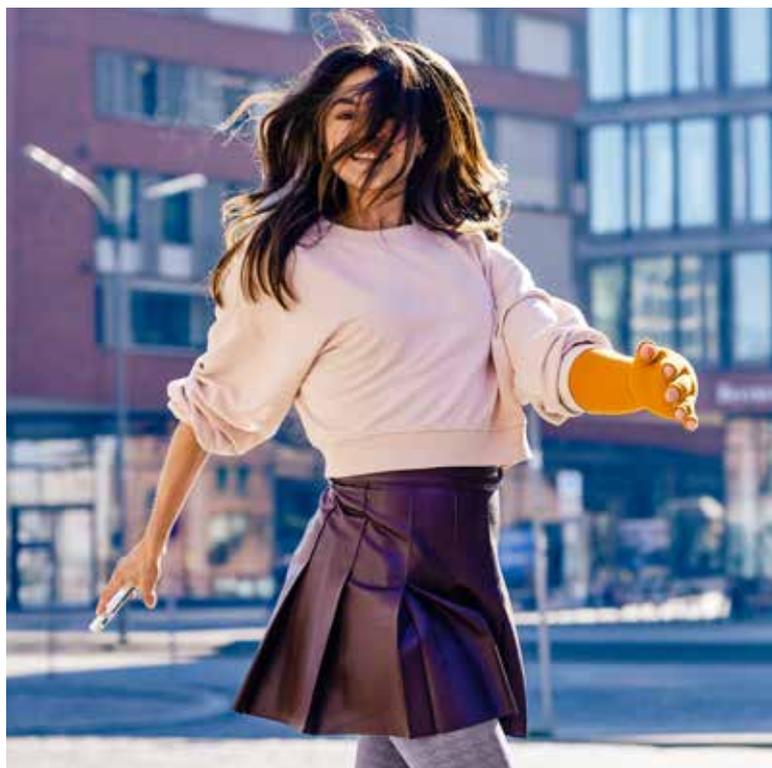

Modèles livrables

AD Gant prolongé jusqu'à D 	AE Gant prolongé jusqu'à E 	AF Bandage pour bras avec main jusqu'à F 	AG Bandage pour bras avec main jusqu'à G
CD Bandage pour bras sans main jusqu'à D 	CE Bandage pour bras sans main jusqu'à E 	CF Bandage pour bras sans main jusqu'à F 	CG Bandage pour bras sans main jusqu'à G
DG Manchette 	EG Manchette 	Jonction boléro 	
Possibilités de fixation 	Bande anti-glisse 	Empiècement pour épaule Avec sangle d'épaule (HK) en G 	Empiècement pour épaule avec fixation pour soutien-gorge (H) en G

Avantages du produit



Clima Comfort

Variété

Perfect Fit

Anatomic Fit

Clima Fresh



Modèles standard

Fabrication sur mesure	Uniquement
Extrémité proximale	Légèrement en biais pour tous les modèles, sauf AC1 Extrémité poreuse droite : AC1
Extrémité distale	Extrémité poreuse droite : CD, CE, CF, CG
Doigts	Sans doigts avec base du pouce, doigts ouverts/fermés avec base du pouce : AE, AF, AG, AC1, AD
Doigtier	Ouvert ou fermé

Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %

Parties main pour AC1



Conseil medi :



les butlers medi facilitent l'enflage⁴

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 70 et suivantes

¹ Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

² Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

³ Les éléments design et les éléments mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance. Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.

⁴ De manière générale s'applique pour les aides à l'enflage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

Classe de compression

CCL 1, 2, 3

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard




Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Motifs³

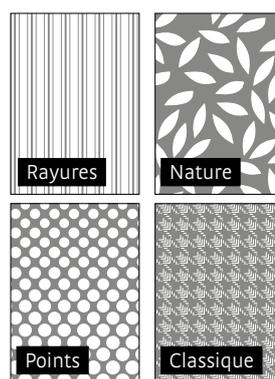

Disponible avec cristaux scintillants.



mediven® mondi esprit

Doux. Fin. Bel aspect.

Conseil medi¹:

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven mondi esprit dans les cas suivants :

- Tissu conjonctif normal à ferme
- Pas de plis de peau ni de variations de calibre ou sous forme modérée
- Poids normal

Indications²

- Lymphœdèmes primaires et secondaires des stades 1 et 2
- Lipœdèmes des stades 1 et 2
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Traitement de cicatrices

Propriétés

- Rigidité légère à moyenne
- Maille douce
- Résistance élevée

Particularités

- De nombreuses possibilités de combinaison avec des accessoires particuliers
- Nombreux modèles, p. ex. manchettes pour les soins doubles ou multiples
- Facteur de protection UV 40
- Effet anti-odeur avec Clima Fresh
- Tricot respirant grâce à Clima Comfort
- Choix tendance : 6 coloris standard, 5 coloris tendance et 4 motifs à combiner pour éléments design et éléments mode
- Possibilité de décoration avec des cristaux scintillants

Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passer au lave-linge et au sèche-linge



Modèles livrables

AD

Gant prolongé jusqu'à D



AE

Gant prolongé jusqu'à E



AF

Bandage pour bras avec main jusqu'à F



AG

Bandage pour bras avec main jusqu'à G



CD

Bandage pour bras sans main jusqu'à D



CE

Bandage pour bras sans main jusqu'à E



CF

Bandage pour bras sans main jusqu'à F



CG

Bandage pour bras sans main jusqu'à G



DG

Manchette



EG

Manchette



Jonction boléro



Possibilités de fixation

Bande anti-glisse

Empiècement pour épaule

Empiècement pour épaule



Avantages du produit



Clima Comfort



Variété



Perfect Fit



Anatomic Fit



Clima Fresh



Modèles standard

Fabrication sur mesure	Uniquement
Extrémité proximale	Légèrement en biais pour tous les modèles, sauf AC1 Extrémité poreuse droite : AC1
Extrémité distale	Extrémité poreuse droite : CD, CE, CF, CG
Doigts	Sans doigts avec base du pouce, doigts ouverts / fermés avec base du pouce : AE, AF, AG, AC1, AD


Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %

Parties main pour AC1



Conseil medi :

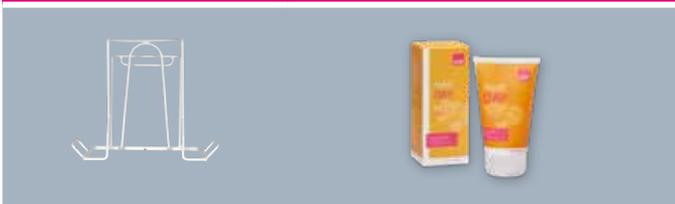

les butlers medi facilitent l'enfilage⁴

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 70 et suivantes

Classe de compression

CCL 1, 2, 3

Stade de l'œdème



Coloris

Coloris standard




Coloris tendance

Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés



Motifs³

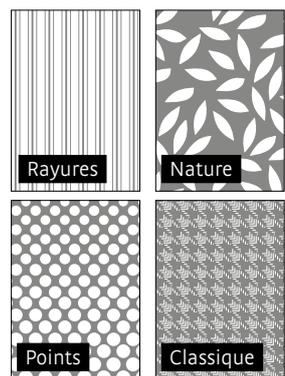

Disponible avec cristaux scintillants.



¹ Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.
² Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.
³ Les éléments design et mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance. Le supplément de prix pour les éléments mode est indiqué dans la liste des prix en vigueur.
⁴ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 08/03/2021)

mediven harmony®

Manchon en tricot circulaire en sept tailles standard.

Indications³

- Thrombose veineuse du bras
- Recommandation medi :
Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques (remarque : ne convient pas aux œdèmes prononcés !)

Propriétés

- Double ellipse à l'intérieur et à l'extérieur du coude pour
- une réduction des plis formés dans le creux du coude, pour la prévention des constrictions, des points de pression, des irritations de la peau, des lésions de la peau dans la zone du tendon fléchisseur et des structures vasculaires
- Garantit la fonctionnalité articulaire
- Facteur de protection UV²

Consignes de lavage

Facile à entretenir    


Passer au lave-linge et au sèche-linge.



Circonférence / partie main (cm)

Tailles	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15 – 18	17 – 20	19 – 21,5	21 – 23,5	23 – 26	25,5 – 30
cC	13,5 – 15,5	15 – 18	17 – 20	19 – 21	20 – 23,5	22,5 – 27,5
cB	15,5 – 20	17,5 – 21	19,5 – 23	20,5 – 24	22,5 – 26	24,5 – 30
cA	15 – 19	17 – 20	19 – 22	20 – 23	22 – 25	24 – 29

Partie main

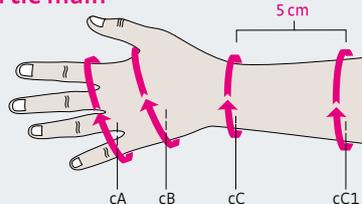

Modèles livrables

Partie main AC1 sans doigts, avec base du pouce

AC1 gant sans couture avec doigts compressifs



sans doigts

CCL 1: Art.No.:
2Y90x02-7000
CCL 2: Art.No.:
2Y90x02-7000

avec des doigts

CCL 1: Art.No.:
2Z90x02-7000
CCL 2: Art.No.:
2Z91x02-7000

Composition partie main

	Élasthane (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	18%	82%
CCL 2	22%	78%

Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enfilage¹

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 96 et suivantes

* Le point de mesure cC1 se trouve 5 cm au-dessus de cC.

¹ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

² Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

Avantages du produit



Clima Comfort



Perfect Fit



Double ellipses



Classe de compression

CCL 1, 2

Coloris


S = Standard

Sable
S

Caramel
S

Noir
S

Manchon

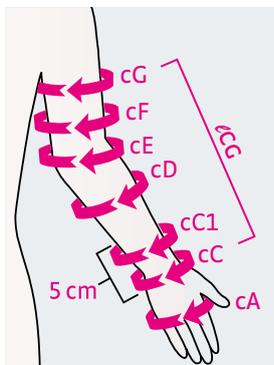

Points de mesure pour mediven harmony

Modèles standard

Coloris	Sable, Caramel, Noir
Tailles de série	I – VII, standard et extra-large
Fabrication sur mesure	n'est pas possible
Extrémité supérieure	Bande anti-glisse à picots, mince, 2,5 cm
Partie main	sans doigts, avec base du pouce

Composition

Type de traitement	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	34%	66%
CCL 2	43%	57%

Longueur (cm)

Longueur standard 41 – 47

Modèles (tous les modèles existent en version standard et extra-large)

AG manchon combiné



Manchon AG avec partie main intégrée et avec bande anti-glisse



AG manchon combiné avec fixation à l'épaule



CG



Manchon CG avec bande anti-glisse



CG avec fixation à l'épaule



Manchon	Taille I		Taille II		Taille I – III		Taille IV	
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large
Circonférence (cm)								
cG	25,5 – 28	28,5 – 31	28 – 30,5	30,5 – 33,5	30 – 33	33 – 36	32 – 35	35 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28	25 – 27,5	27,5 – 30	27,5 – 30	30 – 33	29,5 – 32	32 – 35
cE	23 – 25	24 – 26	24,5 – 26,5	26,5 – 29	26 – 28,5	28,5 – 31	27,5 – 30	30 – 33
cD	22 – 24	24 – 26	23 – 25	25 – 27,5	24 – 26	26 – 28,5	25 – 27,5	28 – 30,5
cC1 = 100 %*	15 – 16,5		16,5 – 18		18 – 19,5		19,5 – 21	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16 – 17,5		17,5 – 19	
cA	15 – 18		16 – 19		17 – 20		19 – 22	
Manchon	Taille V		Taille VI		Taille VII			
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large		
Circonférence (cm)								
cG	33,5 – 36,5	37 – 40,5	36 – 39,5	39,5 – 43	38 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31 – 34	34 – 37	33 – 36	36 – 39,5	35 – 38,5	38,5 – 42		
cE	29 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39		
cD	27 – 29,5	29,5 – 32	28,5 – 31	31 – 34	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %*	21 – 23		23 – 25		25 – 27,5			
cC	19 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20 – 23		22 – 25		24 – 27			

* Le point de mesure cC1 se trouve 5 cm au-dessus de cC.

Modèles mediven® pour les bras




Palette de coloris

Coloris		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Coloris standard				
Sable		•	•	•
Cachemire			•	•
Caramel		•	•	•
Noir			•	•
Anthracite			•	•
Bleu marine			•	•
Coloris tendance (délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés)				
medi Magenta			•	•
Gris			•	•
Châtain			•	•
Jaune mangue			•	•
Framboise			•	•

Vous trouverez aussi tous les coloris standard et tendance pour nos modèles pour bras sur le medi e-shop.

Modèles mediven® pour les bras

Motifs

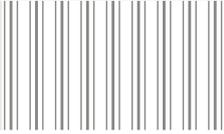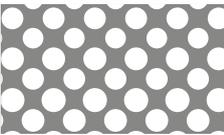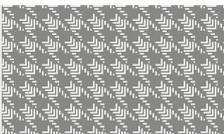Motif		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Rayures			•	•
Nature			•	•
Points			•	•
Classique			•	•

Tout simplement medi : les éléments design et fashion sont disponibles pour tous les coloris standard et tendance



Élément fashion



Élément design

Cristaux scintillants		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Motifs² (placement sur la partie inférieure ou supérieure du bras)				
Vent en or			•	•
Fierté à Athracite			•	•
Trio en argent			•	•

¹ Les éléments design et mode peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance.

² Les trois motifs peuvent être librement combinés avec tous les coloris standard et tendance.


Le supplément de prix pour les cristaux scintillants est indiqué dans la liste des prix en vigueur.

Modèles mediven® pour les bras

Accessoires

Accessoire		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Bandes anti-glisse				
Bandes anti-glisse 5 cm				
Bande anti-glisse à picots			•	•
Bande anti-glisse à picots avec motif			•	•
Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles			•	•
Bande anti-glisse large avec motif de rose			•	•
Bandes anti-glisse 2,5 cm				
Bande anti-glisse à picots		•	•	•
Sections de bande anti-glisse				
Segments anti-glisse à picots, micro-picots ou larges <ul style="list-style-type: none"> • le long du biais • à l'extérieur, au niveau de la paume de la main 			•	•
Picots anti-glisse				
Segments avec picots en silicone <ul style="list-style-type: none"> • le long du biais • à l'extérieur, au niveau de la paume de la main 			•	•
Autres fixations				
Empiècement pour épaule				
Standard			•	•
Anatomique			•	•
Fixation pour l'empiècement d'épaule				
Fixation pour soutien-gorge			•	•

Accessoire		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Fixation pour l'empîecement d'épaule				
Sangle d'épaule étroite/large			•	•
Jonction boléro			•	•
Fixation pour l'articulation de la main				
Fixation pour l'articulation de la main réglable par fermeture velcro			•	•
Fermetures				
Fermeture éclair			•	•
Fermeture velcro			•	•
Bande à œillets et crochets			•	•
Coussinets et doublure				
Patch lymphatique avec poche intégrée			•	•
• Patch lymphatique côtélé			•	•
• Patch lymphatique à petits picots (standard)			•	•
Coussinets			•	•

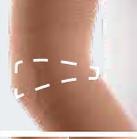Poche pour patch lymphatique ou coussinet			•	•
Accessoire		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Coussinets et doublure				
Doublure			•	•
Extrémités				
Extrémité bras (proximale)				
Légèrement en biais (standard)			•	•
Fortement en biais			•	•
Droite			•	•
Coude				
Marques de tricotage • 160° (standard) • 150° • 135° • sans marques			•	•
Zone fonctionnelle coude				•
Double ellipse Ellipse à l'intérieur et à l'extérieur du coude			•	
Rangées poreuses				
Fil de trame de compression seulement une rangée sur deux			•	•

Partie main				
Variantes pour les doigts				
Ouvert			•	•
Accessoire		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 bras
Partie main				
Variantes pour les doigts				
Fermé			•	•
Sans doigts • avec base du pouce • avec ouverture pour le pouce		•	•	•
Ouverture pour le pouce			•	•
Base du pouce		•	•	•
Compartment doigts			•	•
Sans doigtier pour certains doigts			•	•
Variantes de coutures				
Couture renforcée par une bande			•	•
Remaillage			•	•
Étiquette à l'extérieur			•	•
Modèles pour moignon				
Extrémité du bas plate (en cercle)			•	•
Extrémité du bas anatomique (extrémité du moignon)			•	•

Accessoires medi

medi propose également des produits qui viennent compléter les bas de compression médicaux en tricot plat et circulaire.

La peau a particulièrement besoin de soins au cours d'une thérapie par compression. Vos clients évoquent des démangeaisons ou une peau sèche ? Conseillez-leur les produits de soin de medi. Ils sont spécialement conçus pour les patients souffrant de problèmes veineux ou d'œdèmes et apportent à la peau des substances précieuses.

Les produits d'entretien pour les bas de compression prennent soin de la maille et garantissent une longue durée de vie des bas.

Vos clients ont besoin d'aide pour enfiler leurs bas de compression médicaux ? Il existe différents types d'aides à l'enfilage et au retrait, qui simplifient grandement l'utilisation quotidienne des bas de compression médicaux.



Patchs lymphatiques

Plaque d'échange et exemplaire de démonstration.
À utiliser uniquement dans les bas de compression mediven tricotés à plat.

Les patchs lymphatiques sont utilisés pour renforcer le traitement des lipœdèmes et des lymphœdèmes au moyen de bas de compression médicaux tricotés à plat. Grâce à un rembourrage sous-jacent, la compression est répartie de manière homogène dans les zones proéminentes. (p. ex. bord de la main ou du pied, cheville) en direction de la surface des mains, des renforcements extérieurs entourant la cheville ou des zones latérales au tendon d'Achille, pour éviter les pics de compression.

Les patchs lymphatiques sont intégrés dans le bas de compression tricoté à plat, de manière à ce que la pression de compression du bas soit

- répartie de manière homogène sur une plus grande surface d'appui ou
- augmentée ponctuellement si nécessaire.

Les variantes suivantes sont disponibles :


- Patch lymphatique côtelé : lymphœdème de la jambe (standard) et du bras
- Patch lymphatique à picots fins : lymphœdème du bras (standard) et de la jambe
- Patch lymphatique à picots grossiers : lipœdème (de la cuisse)



Patch lymphatique à petits picots



Patch lymphatique côtelé

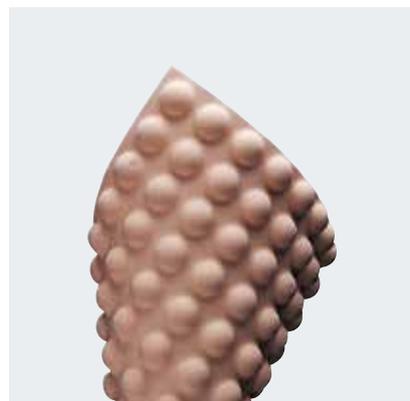

Patch lymphatique à gros picots

Soin de la peau medi

Offrez davantage à vos clients. Par exemple une peau douce et soyeuse pendant leur thérapie de compression.

Les produits de soin de la peau de medi contiennent de nombreux agents bienfaisants. Ils s'harmonisent parfaitement avec la thérapie veineuse et assurent une peau saine et soignée.


Remarque

Les bas de compression médicaux jouent un rôle essentiel dans la thérapie des maladies veineuses et des œdèmes. Mais il ne faut pas négliger d'apporter à la peau les soins adaptés, car les patients portent généralement leurs bas tous les jours, ce qui peut stresser la peau. Les produits medi de soin de la peau sont spécialement conçus pour la thérapie par compression et permettent de maintenir une peau bien équilibrée.

Conseil important pour les personnes allergiques

Tous les produits respectent des exigences élevées et sont fabriqués sans parabènes (= conservateurs) ni alcools de lanoline.

Les produits de soin medi n'ont pas de date de péremption ou de durabilité minimale. Ils comportent une icône en forme de boîte ouverte et une indication de mois. Ce marquage signifie que le produit doit être utilisé dans les 6, 9 ou 12 mois qui suivent son ouverture et la première utilisation. On retrouve aussi ce symbole par exemple sur les gels douche.

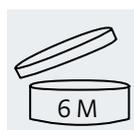

Les produits de soin medi sont des produits cosmétiques et ne doivent être utilisés que sur une peau intacte

medi day® – Soins rafraîchissants de la peau aux extraits de marronnier d'Inde

- Effet agréablement rafraîchissant
- Peau souple et soignée
- Réduit la sensation de tiraillement
- Accroît le confort du port des bas de compression médicaux

Tube de 50 ml, tube de 150 ml, flacon de 500 ml

Article	UV	Réf.
medi day, tube de 50 ml	Lot de 6	P400025
medi day, tube de 150 ml	Lot de 6	P400026
medi day, flacon de 500 ml	1 pièce	P400027



medi day

medi night – crème de soins régénératrice à l'hamamélis

- Apporte un repos bienfaisant pendant la nuit.
- Apaise la peau et favorise sa régénération.

Tube de 50 ml, tube de 150 ml

Article	UV	Réf.
medi night, tube de 50 ml	Lot de 6	P500025
medi night, tube de 150 ml	Lot de 6	P500026



medi night

medi fresh – spray rafraîchissant au menthol

- Le plein de fraîcheur pendant la journée.
- Sensation immédiate de rafraîchissement
- Application plusieurs fois par jour possible
- N'abîme pas la maille
- Utilisation aisée au quotidien

Flacon de 100 ml

Article	UV	Réf.
medi fresh, flacon de 100 ml	Lot de 6	P900026



medi fresh

*Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant www.dermatest-garantie.de

medi soft – soin de la peau hydratant au marronnier d'Inde et à l'urée

- Mousse douce et onctueuse pour le soin de la peau à toute heure de la journée
- Peau souple et soignée
- Réduit la sensation de tiraillement
- Accroît le confort du port des bas de compression médicaux
- Améliore le maintien du tricot et des bandes anti-glisse

Flacon de 125 ml

Article	UV	Réf.
medi soft, flacon de 125 ml	Lot de 6	P800026



medi soft

Aides au traitement

medi fix

Article	UV	Réf.
medi fix, 50 ml	Lot de 6	1023125

Lotion adhésive pour les bas de compression avec bordure en maille



Soft-Roller medi fix

Entretien de la maille medi

La lessive pour le lavage à la main spéciale medi est spécifiquement conçue pour les bas de compression mediven. Elle convient pour le lavage quotidien et nettoie la maille en douceur et en profondeur. Le détachant medi élimine les traces de chaussures au niveau du talon et au bout du pied. Il suffit de l'appliquer sur les zones à nettoyer avant la lessive (laisser agir cinq minutes).

Propriétés

- Protection de la couleur
- Entretien en douceur
- Facile à utiliser
- Inodore
- Testé dermatologiquement



medi clean – La lessive pour le lavage à la main pour bas de compression médicaux

Article	UV	Réf.
medi clean, 200 ml	Lot de 6	P920026



medi clean

medi spot ex – liquide détachant

Article	UV	Réf.
medi spot ex, 15 ml	Lot de 6	P930025



medi spot ex

Filet à linge medi

Article	UV	Réf.
Filet à linge medi	15 pièces	1020585



Filet à linge medi

Gants en caoutchouc medi

Facilitent la répartition et le bon positionnement des articles de compression sur la jambe ou le bras. Matière : caoutchouc naturel

Article	Taille	UV	Réf.
Gant en caoutchouc	small	1 paire	6901022000
Gant en caoutchouc	medium	1 paire	6901023000
Gant en caoutchouc	large	1 paire	6901024000
<hr/>			
Gant en caoutchouc	small	12 paires / carton	6901122000
Gant en caoutchouc	medium	12 paires / carton	6901123000
Gant en caoutchouc	large	12 paires / carton	6901124000



Gants en caoutchouc

Gants en tissu medi avec latex

Facilitent la répartition et le bon positionnement des articles de compression sur la jambe ou le bras. Matière : polyester et latex


Article	Taille	UV	Réf.
Gants en tissu	small	1 paire	6903022000
Gants en tissu	medium	1 paire	6903023000
Gants en tissu	large	1 paire	6903024000
<hr/>			
Gants en tissu	small	12 paires / carton	6903122000
Gants en tissu	medium	12 paires / carton	6903123000
Gants en tissu	large	12 paires / carton	6903124000



Gants en tissu

Choix des tailles pour les gants medi en tissu et en caoutchouc

Posez votre main droite sur la ligne tracée pour le côté extérieur de la main et du pouce. Posez les doigts de façon décontractée, sans les écarter. Vous pouvez maintenant lire votre taille de gants sur l'échelle.

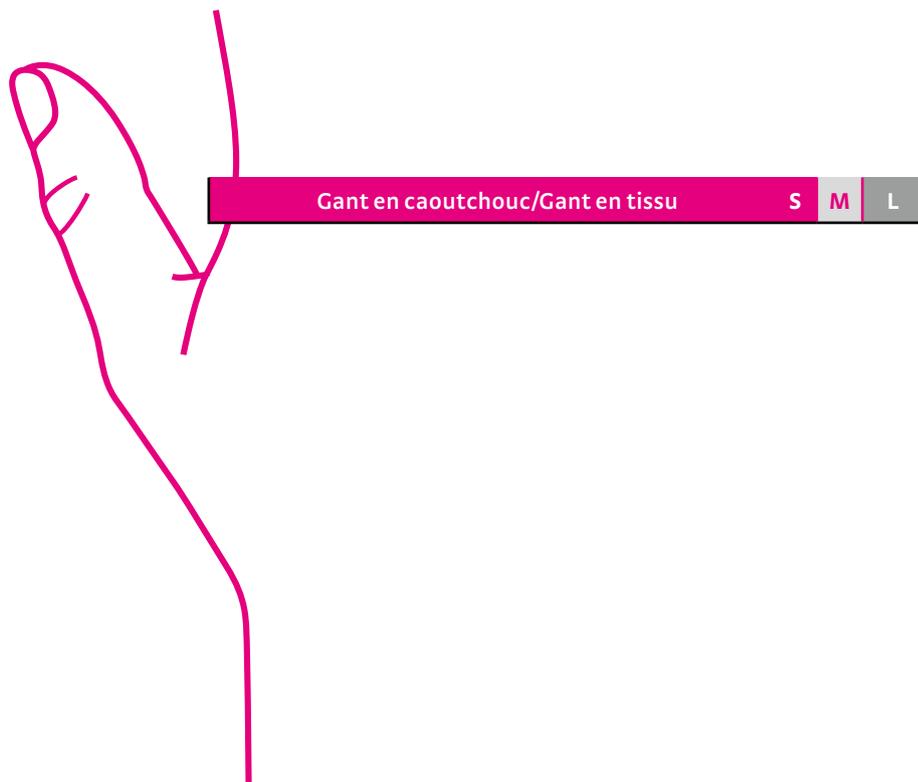

Butler medi

Aides à l'enfilage des bas de compression médicaux.

Indications*

- Paralysies
- Faiblesse liée à l'âge
- Arthrose / Rhumatisme
- Obésité grave
- Raideurs importantes de la colonne vertébrale, de la hanche ou du genou
- Maladies dégénératives des mains / au niveau des mains
- Suite de blessures et d'amputations

Butler medi à long manche

Article	Réf.
Butler medi à long manche	6900052

Pour bas et collants de compression

Big Butler medi

Article	Réf.
Big Butler medi	6900102

Pour plus de confort lors de l'enfilage de bas en grande taille, conseillé pour les tailles V, VI et VII


Butler medi à manche télescopique

Article	Réf.
Butler medi à manche télescopique	6900051


Pour les patients à mobilité réduite, longueur de manche réglable

Conseil medi


Les aides à l'enfilage et au retrait servent à protéger et à ménager le matériau du bas et simplifient l'enfilage et le retrait des bas de compression médicaux. Elles permettent en particulier aux patients à mobilité restreinte de manipuler les bas, car elles ne demandent que peu de mouvement et de force.¹

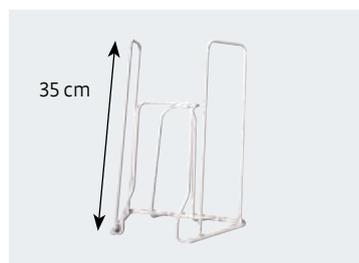

Butler medi à long manche

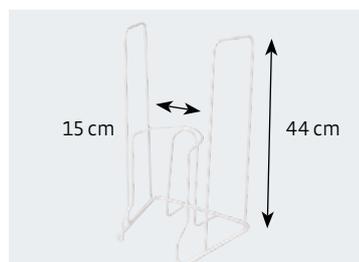

Big Butler medi

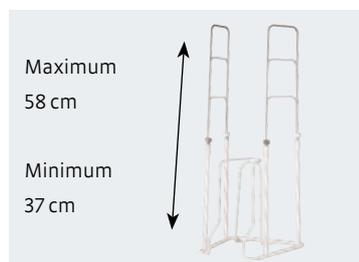


Butler medi à manche télescopique

¹ De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 04/04/2021)

Butler medi pour collants

Article	Réf.
Butler medi pour collants	6900055

Pour enfiler facilement les collants de compression

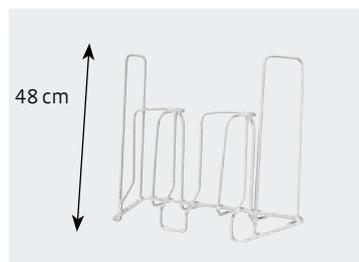

Butler medi pour collants

Butler medi pour bras

Article	Diamètre de la tige	Réf.
Butler medi pour bras	11 cm	6900057

Facilite l'enfilage des manchons sans l'aide d'une tierce personne.



Butler medi pour bras

medi 2in1

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs



medi 2in1

Conseil medi :

Une étude* prouve que l'utilisation d'une aide à l'enfilage et au retrait facilite grandement l'utilisation des bas de compression. Le taux de réussite est passé de 72 à 93 %. Les sujets ont trouvé l'enfilage plus facile et plus agréable. Parmi les aides à l'enfilage utilisées, le Butler medi a obtenu le meilleur taux de réussite (90 %) pour mettre un bas de compression de catégorie 3.

* Sippel K, Seifert B, Hafner J. : Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. *In* : Endovasc Surg 2015;49:221-229.

Aides à l'enfilage medi pour bas de compression médicaux à bout ouvert

Aides à l'enfilage pour les bas sans pointe

Article	UV	Réf.
Aide à l'enfilage	À l'unité 1 pièce	6900002
Aide à l'enfilage	Carton de vente 40 pièces	6900022



Aides à l'enfilage pour bas à bout ouvert



Services

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations nécessaires pour vos commandes.

Utilisez au quotidien l'assistance numérique de medi dans de nombreux domaines

gain de temps – transparence – innovation

Retrouvez des informations détaillées sous www.medi.de/medigital ou en passant directement par le code QR ou l'URL courte concernés.

Conseil et commande

medi vision

medi vision est un outil numérique mobile à votre disposition pour prendre les mesures des bas de compression médicaux de manière innovante. Vous trouverez ici plus d'informations :



Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement votre représentation commerciale medi Compression.



Boutique en ligne medi

La boutique en ligne medi vous aide à choisir et à combiner les produits. Vous pouvez en outre générer des devis en ligne sans entrer les mesures du patient et effectuer vos commandes chez medi et les gérer de manière efficace.



Connaissez-vous notre newsletter gratuite ?

Ne manquez plus aucune information sur les thèmes techniques, de service ou sur les produits vedettes de medi – c'est gratuit, présenté sous forme synthétique et actuel ! Les newsletters medi vous fournissent un savoir pratique et utile dans votre quotidien professionnel. Avec des aperçus passionnants à découvrir dans les interviews de revendeurs, de patients, de médecins et de physiothérapeutes.

Nos newsletters pour vous :

medi for you


- ✓ Pour les cadres et les professionnels dans le commerce spécialisé de matériel médical
- ✓ Vous découvrirez : des interviews spécialisés, des informations de santé, des nouveautés de produits dans les domaines de la compression, de l'orthopédie et de la pédicure médicale, mais aussi des actualités de la profession
- ✓ Six parutions par an

Inscription gratuite : medi.biz/mfy

medi Lymph-News

- ✓ Pour tous ceux qui traitent et accompagnent des patients en lymphologie
- ✓ Vous découvrirez : des interviews avec des experts et des contributions externes de spécialistes de lymphologie, des nouveautés de produits et des concepts de traitement, ainsi que actualités sur la politique de santé
- ✓ Quatre parutions par an

Inscription gratuite : medi.biz/lymph-news

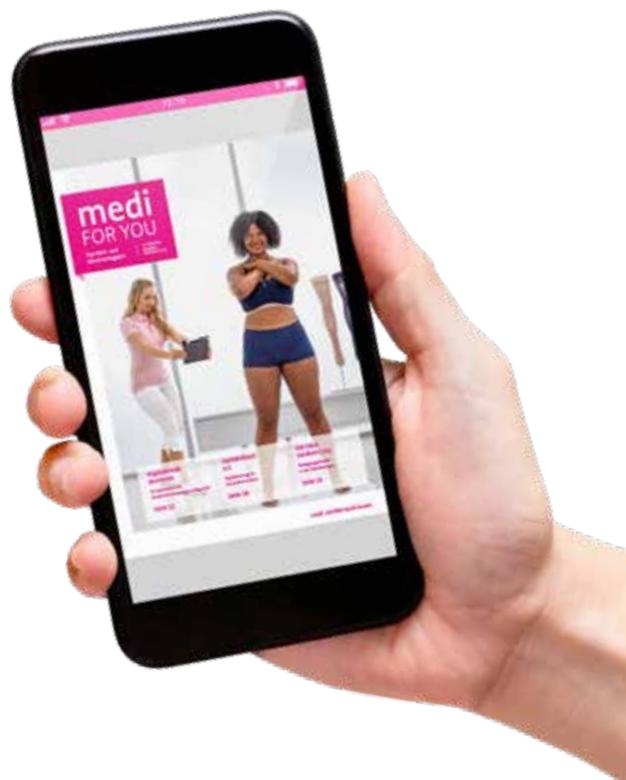

Usage prévu

mediven® 550 jambe, mediven® cosy, mediven mondi®

Accessoire de compression médical tricoté à plat, destiné à la compression des extrémités inférieures, en particulier lors du traitement de troubles du système lymphatique.

mediven® 550 bras, mediven mondi esprit®, mediven® harmony SL

Accessoire de compression médical tricoté à plat, destiné à la compression des extrémités supérieures, en particulier lors du traitement de troubles du système veineux ou lymphatique.

mediven® harmony

Accessoire de compression médical tricoté circulaire, destiné à la compression des extrémités supérieures, en particulier lors du traitement de troubles du système veineux ou lymphatique.

Butler medi pour jambe :

Aide à l'enfilage pour les bas et collants de compression médicaux/cliniques.

Butler medi pour bras :

Aide à l'enfilage pour manchons médicaux/cliniques de compression du bras