



So vermessen Sie Ihre Patienten richtig

Der medi Leitfaden für das richtige Vermessen von Zehenversorgungen.

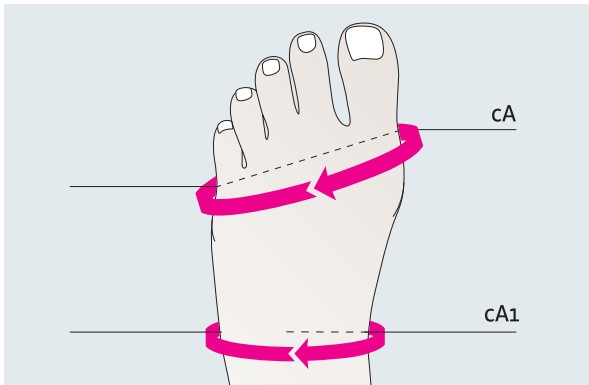


1. Umfang Fuß

- Bein liegt auf Liege auf
- Umfangmaße messen
- Abmesspunkte markieren

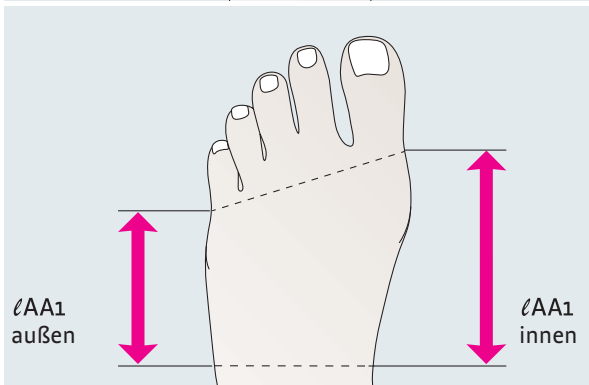


2. Längen Fuß

- Wie (1)
- Längenmaße innen und außen messen
- Von Markierung zu Markierung an den Fußseiten entlang messen

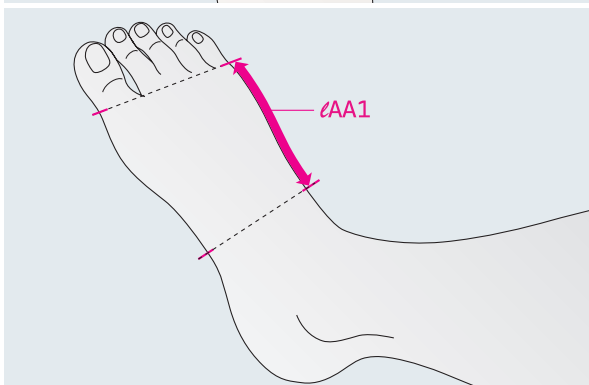


Hinweis

medi orientiert sich an der Messtechnik gemäß den Richtlinien der Bundesfachschule für Orthopädie-Technik in Dortmund.

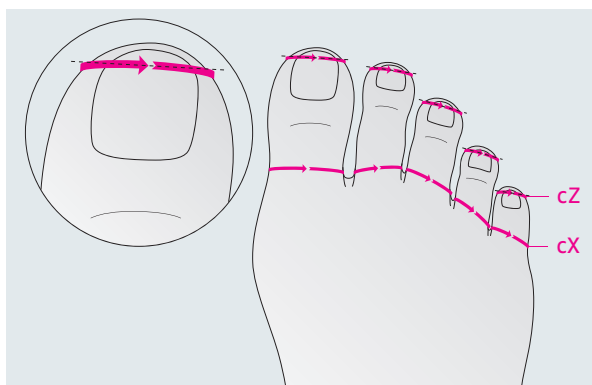

3. Umfang Zehen

- Wie (1)
- Umfänge cX an Schwimmhaut messen
- Umfang cZ direkt am Abschluss, über dem Nagel messen

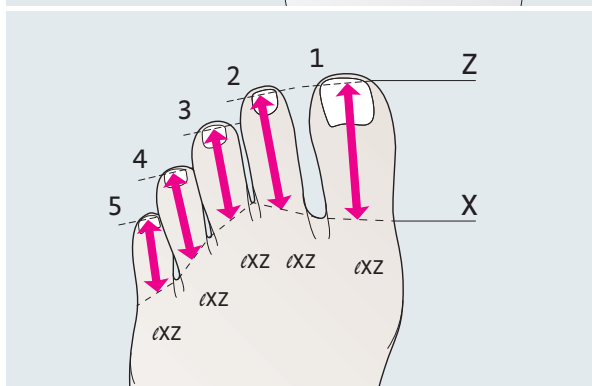

4. Länge Zehen

- Wie (1)
- Längenmaße von Schwimmhaut bis Zehenabschluss auf der Oberseite der Zehen messen.

Kennen Sie schon unseren medi e-shop?

Einfach und bequem online bestellen unter eshop.medi.de – auch außerhalb unserer Geschäftszeiten.

Kostenvoranschlag ohne Maßeingabe

Sie können im medi e-shop auch Kostenvorschläge ohne Maßeingabe anfordern!

Tipp:

- Anders als bei klassischen Beinversorgungen, wie z.B. Knie- und Oberschenkelstrümpfe, wird der Umfang cA bei Zehenkappen direkt am Zehenansatz (= Längenmaßpunkte A innen und außen) gemessen. Unabhängig davon wird cA in jedem Fall bis zum ersten Widerstand gemessen.
- Der untere (proximale) Zehenumfang cX ist immer größer oder gleich dem oberen (distalen) Zehenumfang cZ.
- Sowohl geschlossene als auch offene Zehenkappen sollten stets bis zum Zehenabschluss (distal) reichen. Bis dorthin werden die Zehenlängen gemessen und der Umfang cZ ermittelt.
- Die innere Länge IAA1 der einzelnen Zehenkappen sollte bei Erwachsenen in der Regel nicht kleiner als 7 cm ausfallen, denn: je kürzer die Zehenkappe, desto geringer ist der Halt.