



Comment prendre correctement les mesures de vos patients

Le guide medi vous assiste pour bien prendre les mesures pour les gantelets d'orteils.

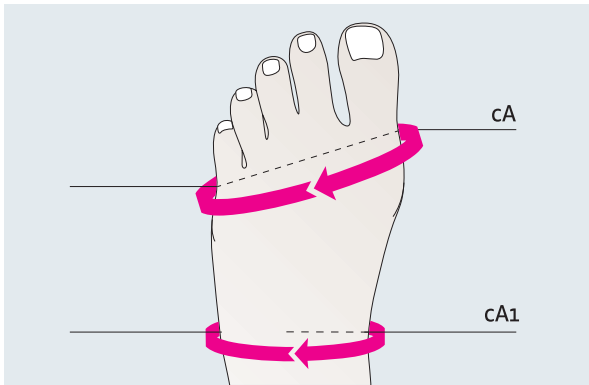


1. Circonférence du pied

- La jambe repose sur le support
- Prendre les dimensions circonférentielles
- Marquer les points de mesure

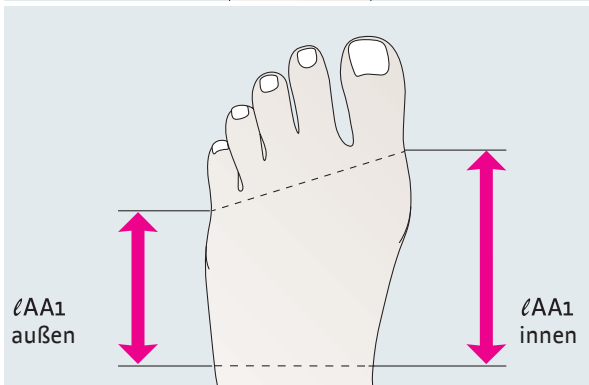


2. Longueurs du pied

- Voir (1)
- Mesurer les longueurs intérieure et extérieure
- Mesurer de repère en repère le long des côtés du pied

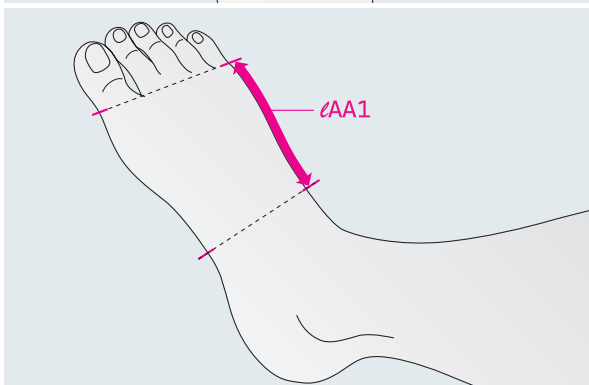

Remarque

medi s'oriente vers la métrologie selon les directives de la Bundesfachschule für Ortopädie-Technik à Dortmund

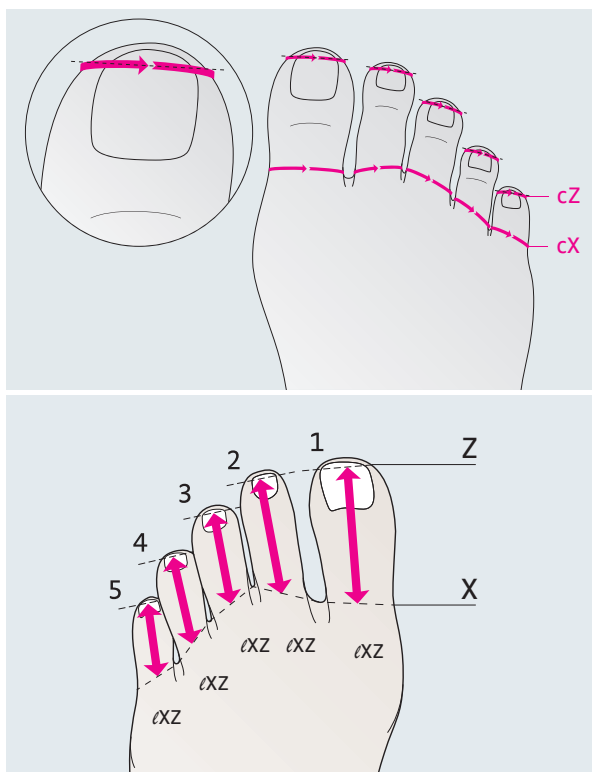

3. Circonférence orteils

- Voir (1)
- Mesurer les circonférences cX à la membrane interdigitale
- Mesurer la circonférence cZ directement au début du lit de l'ongle

4. Circonférence du pied

- Voir (1)
- Mesurer la longueur à partir de la membrane interdigitale jusqu'à l'extrémité des orteils sur la face supérieure des orteils

Connaissez-vous déjà notre boutique medi e-shop ?

Commandez facilement et confortablement en ligne sur eshop.medi.de – même en dehors de nos heures d'ouverture.

Devis sans prise de mesures

Vous pouvez également demander un devis sans prendre de mesures dans notre boutique medi e-shop !

Conseils de medi :

- Contrairement aux articles classiques pour les jambes, tels que les bas jarret et les bas cuisses, la valeur de circonférence cA des gantelets d'orteils est mesurée directement à la base des orteils (= points de mesure de la longueur A à l'intérieur et à l'extérieur). Quoi qu'il en soit, cA est toujours mesurée jusqu'à la première résistance.
- La circonférence inférieure (proximale) de l'orteil cX est toujours supérieure ou égale à la circonférence supérieure (distale) de l'orteil cZ.
- Les gantelets d'orteils, qu'ils soient fermés ou ouverts, doivent toujours atteindre le bout de l'orteil (distal). Les longueurs d'orteils sont mesurées jusqu'à ce point et la circonférence cZ est déterminée.
- En règle générale, la longueur intérieure lAA₁ de chaque gantelet d'orteils ne devrait pas être inférieure à 7 cm chez les adultes – car plus le gantelet d'orteils est court, moins il y a de soutien.